

nitolic® NAVODILA ZA UPORABO



Komplet za odstranjevanje naglavnih uši Nitolic® je namenjen celoviti odpravi okužbe las in lašča (*Pediculosis*).
ki jo povzročajo naglavne uši (*lat. Pediculus humanus capitis*).

Kako deluje:

- uničuje jajčeca uši (gnide)
- omogoča lažje odstranjevanje uši in gnid s pomočjo glavnika
- z uporabo odstranjujemo naglavne uši in gnide iz okolja okužene osebe
- uničuje vse aktivne razvojne faze naglavnih uši

Pred uporabo vedno preberite navodila za uporabo. Za učinkovito delovanje sledite naslednjim navodilom:

- Shranite ta navodila za prihodnjo uporabo.
- Uporabljajte le v skladu z navodili za uporabo.
- V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na vašega zdravnika ali farmacevta.
- V primeru stranskih učinkov takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z vašim zdravnikom.

Komplet za odstranjevanje naglavnih uši NITOLIC® vsebuje:

① PRŠILO NITOLIC®

Medicinski pripomoček namenjen odpravi okužbe las in lašča, ki jo povzročajo naglavne uši (*lat. Pediculus humanus capitis*).

② Odstranevalec gnid NITOLIC®

Ta medicinski pripomoček je namenjen za uporabo pri odpravi okužbe las in lašča (*Pediculosis*), ki jo povzročajo naglavne uši (*lat. Pediculus humanus capitis*)

Pomaga pri odpravi gnid prilepljenih na lase in s tem olajša česanje ter spiranje.

③ Pralno sredstvo NITOLIC®

Dodatek k pranju za odstranjevanje uši in gnid iz tkanin (oblačila, posteljnina, itn.).

④ Glavnik za odstranjevanje uši in gnid NITOLIC®

Namenjen je vizualnemu diagnostičnemu pregledu las in lašča ter odstranjevanju uši in gnid.

⑤ Zaščitno pokrivalo NITOLIC®

Da bo čas med odstranjevanjem mineval bolj prijetno za vašega otroka.
Sočasno bo otrok tudi spoznal, da naglavne uši niso tako strašne kot se lahko mogoče zdijo.



KORISTNE INFORMACIJE glede naglavnih uši in kompleta za odstranjevanje naglavnih uši NITOLIC®

Naglavna uš je majhen (2,0–4,7 mm) insekt brez kril s sploščenim telesom. Naglavne uši so različnih barv, vse od rumenkasto bele do temne barve, ki se ponavadi ujemata z barvo dlake gostitelja. Naglavne uši se prehranjujejo s človekovo krvjo nekajkrat na dan in živijo v bližini človeškega lašča. Premikajo se z oklepjanjem okoli las s pomočjo treh parov nog v obliki klešč. Odrasla uš diha skozi sedem parov odprtin, ki se nahajajo na njenem prsnem košu in trebuhu.



O-effect® technology

100% učinkovitost proti vsem razvojnim fazam naglavnih uši in gnid.

Ključna značilnost tega medicinskega pripomočka za odstranjevanje uši, je hitro in enakomerno širjenje po lašču in laseh s pomočjo tehnologije učinka-o.

ŽIVLJENJSKI KROG NAGLAVNE UŠI

Dan 0
jajčeca so položena na las

Dan 7-8
izležajo se ličinke (nimfe)

Dan 8-16
razvoj ličink (tri stopnje)

Dan 17-19
razmnoževanje

Dan 19-32
jajčeca so položena na las

Dan 33-35
naglavna uš umre



ODPORNOST NAGLAVNIH UŠI IN MEDICINSKI PRIPOMOČEK NITOLIC®

Naglavne uši so razvile odpornost na tradicionalne insekticide, ki delujejo tako, da prekinejo njihove fiziološke procese kar dandasne lahko vodi v neuspešno odstranjevanje.

Delovanje medicinskega pripomočka NITOLIC® temelji na mehanski zapori dihalnih poti naglavne uši, kar onemogoča, da bi le-ta razvila odpornost na to specifično delovanje.

Samica naglavne uši močno pritrdi jajčeca na spodnji del lasu blizu lašča.

Življenjski cikel naglavne uši je približno 40 dni čeprav ponavadi naglavna uš ne more ostati izven glave (lašča) več kot 24 – 48 ur.

Gnide lahko preživijo na gostitelju vse do 14 dni

Medicinski pripomoček NITOLIC® pomaga pri odstranjevanju naglavnih uši in gnid.

Pralno sredstvo NITOLIC® preprečuje razrast naglavnih uši. Priporočljivo ga je uporabiti kot primarni in sekundarni vir zaščite proti naglavnim ušem, saj s pranjem osebnih stvari (oblačila, posteljnina, itn.), ki so morebiti prišle v stik z okuženo glavo, poskrbljimo za dodatno zaščito.



Medicinski pripomoček NITOLIC® odstrani močno vez med jajčecem in lasmi in s tem olajša česanje ter odstranjevanje jajčec.



NAVODILA ZA UPORABO

POMEMBNI NASVETI

Da bi zagotovili popolno odstranitev uši in preprečili ponovno okužbo, je treba odstranjevanje opraviti sočasno pri vseh članih družine, ki bi lahko bili okuženi z naglavnim ušmi. Odstranjevanje naglavnih uši se mora izvesti pri dobri svetlobi. Pomembno je, da se le-to izvede vse od lasišča pa do konic las. Za učinkovito delovanje nanesite medicinski pripomoček NITOLIC® temeljito po celotnem lasišču in po laseh. Najprej nanesite za ušesi nato po vratu, nato okoli las na koncu še po vseh laseh.



V primeru dolgih las razdelite lase na štiri področja – od spredaj do zadaj in od ušesa do ušesa.



Temeljito nanesite pršilo NITOLIC® na suhe lase, začenši od korena pa vse do konca las. Najprej nanesite za ušesi, nato po vratu, nato okoli las na vratu in na koncu še po vseh laseh.



Vtrite v lase in lasišče pršilo NITOLIC®, tako da zagotovite, da so vse uši in gnode popolnoma prekrite.



Po nanosu pršila NITOLIC®, uporabite zaščitno pokrivalo NITOLIC®, ki je priloženo celotnemu kompletu. Glavo imejte pokrito vsaj eno uro.



Odstranite zaščitno pokrivalo NITOLIC® in umijte lase z vodo in s šamponom. Oprane lase osušite z brisačo. Na roke si vlijte toliko odstranjevalca gnid NITOLIC® kot je potrebno. Za bolj podrobne informacije sledite navodilom za uporabo na odstranjevalcu gnid NITOLIC®.



Odstranite uši in gnode iz las z uporabo glavnika NITOLIC®.



Vse tkanine (oblačila, posteljnino, odeje, itn.), ki so morda prišle v stik z naglavnimi ušmi je potrebno oprati s pralnim sredstvom NITOLIC®. Podatki o pralnem sredstvu NITOLIC® so vključeni v kompletu NITOLIC®.

PREDVIDNO!
Prosimo, da pozorno sledite navodilom ter nadzorujete čas izpostavljenosti medicinskemu pripomočku NITOLIC®.



V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na vašega zdravnika ali farmacevta.



Kako odstraniti gnide iz las?

Odvisno od dolžine las lahko gnide še vedno ostanejo pritrjene na lase. Odstranjevalec gnid Nitolic® prekine povezavo med molekulo (deluje kot lepilo za pritrditev), ki jo naglava uš uporablja pri pritrditvi jajčec na las in samim lasom s čimer postane česanje in odstranitev jajčec lažje. Podatki o odstranjevalcu gnid NITOLIC® so vključeni v kompletu NITOLIC®.



NASVETI ZA ČESANJE

Razdelite dolge lase v posamezna področja in jih ločite s sponskami. Dvignite manjši predel las in jih ločite od večjega tako, da bo vidno lasišče. Pričnite s česanjem posameznih pramenov las tako, da skozi pramen previdno vlečete glavnik NITOLIC® od korenine las pa vse do konice las. Prameni, ki ste jih že počesali ločite fizično od preostalih. Nadaljujte s postopkom vse dokler ne počesete vseh las. Odstranite gnide iz glavnika z robčkom.



POMEMBNE INFORMACIJE

- Dokazana je 100% učinkovitost medicinskega pripomočka NITOLIC®. Ugotovljena je 100% učinkovitost proti vsem aktivnim razvojnim stopnjam uši, vključno proti gnidam, že po prvi uporabi.
- Najpogosteji način, da dobite naglavne uši je neposredni stik z že okuženo osebo (npr. v vrtcu, v šoli, itn.). Zato je pomembno, da si redno in temeljito pregledujete lase vsaj enkrat tedensko.
- Komplet za odstranjevanje naglavnih uši NITOLIC® je medicinski pripomoček za večkratno uporabo. Za razliko od drugih izdelkov, ki se uporabljajo za odstranjevanje naglavnih uši zaradi svojega posebnega načina delovanja onemogoča naglavnim ušem razviti odpornost na delovanje medicinskega pripomočka NITOLIC®.
- Komplet za odstranjevanje naglavnih uši NITOLIC® deluje tako, da gnide dehidrirata. Ko se gnide pri odstranjevanju stisnejo se ob tem zasiši značilni zvok klik. Z glavnikom nato odstranimo gnide.
- Za več informacij obiščite: www.nitolic.com



INFORMACIJE O OBMOČJU UPORABE

OPOZORILA

Uporabljajte medicinski pripomoček NITOLIC® le v skladu z navodili za uporabo.

Pazite, da katerikoli medicinski pripomoček v kompletu NITOLIC® ne zaide v bližino oči, ust, nosu in grla. V primeru stika z očmi sperite takoj z obilo vode (10 do 15 minut). Če draženje ne preneha se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Medicinski pripomoček NITOLIC® je samo za zunanjou uporabo. Ne nanašajte ga v primeru ran, ureznin ali razdražene kože.

Pred uporabo medicinskega pripomočka NITOLIC® in odstranjevalca gnid NITOLIC® nanesite majhno količino obeh na dlan svoje roke in preverite morebitne stranske učinke.

Komplet NITOLIC® uporabite pri otrocih le ob neposrednem nadzoru staršev.

Previdno uporabljajte komplet NITOLIC® z namenom preprečitve morebitnega puščanja ali razlitja.

Medicinski pripomoček NITOLIC® in odstranjevalec gnid NITOLIC® lahko reagirata z nekaterimi losjonimi za nego las in barvanje las.

KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljajte medicinskega pripomočka NITOLIC®, če ste alergični na katerokoli njegovo sestavino.

Ne nanašajte na ureznine, rane ali na razdraženo kožo.

Ne uporabljajte kateregakoli izdelka iz kompleta NITOLIC® po preteku roka uporabe navedenega na embalaži.

Ne uporabljajte pri otrocih mlajših od dveh (2) let.

MOREBITNI STRANSKI UČINKI

Pojavijo se lahko naslednji stranski učinki: draženje kože, rdečina, otekanje kože. V primeru pojava omenjenih stranskih učinkov takoj prenehajte z uporabo kompleta NITOLIC® in se posvetujte s svojim zdravnikom.



POMEMBNE INFORMACIJE

SESTAVA:

- Medicinski pripomoček NITOLIC®: ciklometikon, polisorbat 80, izopropil miristar
- Odstranjevalec gnid NITOLIC®: voda, ocetna kislina, kvaternium-91, behentrimonium klorid, miristil miristar, cetearyl alkohol, tokoferil acetat, dišava

- Pralno sredstvo NITOLIC®: 1,25% benzil benzoat, 0,02% benzizotiazolinon
- Zaščitno pokrivalo NITOLIC®: polietilen nizke gostote (LDPE), 100% naravna guma

- SHRANJEVANJE:
Shranjujte komplet NITOLIC® v suhem, temnem prostoru, pri temperaturi med 5 °C–40 °C. Prazna embalaža se lahko reciklira.

PROIZVAJALEC:

ICB PHARMA
Tomasz Świętosławski,
Pawel Świętosławski
Spółka Jawna
6a Moździerzowców St.
43-602 Jaworzno
Pošta

IME IN NASLOV
DISTRIBUTERJA
ZA SLOVENIJO
IN HRVAŠKO:
Quantum Chimica d.o.o.
Podpeška cesta 151a
1351 Brezovica, Slovenija
www.naravita.si



GLEJ
NAVODILA
ZA UPORABO.



© 2015 Vse pravice pridržane.
NITOLIC® je registrirana blagovna znamka podjetja ICB PHARMA



VAŠE ZADOVOLJSTVO PRI UPORABI TEGA IZDELKA NAM
VELIKO POMENI. SVOJE MNENJE LAHKO DELITE Z NAMI NA:

@ info@naravita.si

Datum izdaje in zaporedna številka navodil za uporabo: IU/ZPN/03.2015
REV-2011701-1-1-1